

LMA Supreme™

Используйте ее всегда, когда вы применяете маску, а также тогда, когда Вы использовали ЭТ трубку.

При интубации возможна различная травма — от повреждения голосовых связок до повреждения мягких тканей глотки. Благодаря легкой установке и уменьшению вероятности травмы, LMA Supreme™ заменила ЭТТ во многих ситуациях. Наличие встроенного канала для желудочного зонда и возможность контроля правильного положения делает LMA Supreme™ более эффективной альтернативой.

Первая одноразовая ларингеальная маска со встроенным дренажным каналом.

Представляем LMA Supreme™ — следующее поколение воздуховодов.

Supreme надежнее

LMA Supreme™ превосходит по надежности все другие ларингеальные маски. Встроенный дренажный канал безопасно отводит жидкости и газ. Несколько простых и быстрых тестов позволяют проверить правильность положения.

Supreme легче

Предельно точный дизайн идеального изгиба обеспечивает легкость установки. Тонкое усовершенствование конструкции делает установку легче. Каждая LMA Supreme™ поставляется стерильной и готовой к использованию.

Решения Supreme

LMA Supreme™ содержит наилучшие особенности конструкции предыдущих воздуховодов LMA™. Это самое лучшее устройство для обеспечения проходимости дыхательных путей во всех необходимых ситуациях.

Ключевые особенности конструкции LMA Supreme™




Последний воздуховод LMA™, разработанный доктором Арчи Брейном





Клинические ситуации, когда использование LMA Supreme™ может быть предпочтительнее:

Пациенты	Характеристика	Особенность конструкции	Преимущество
Сахарный диабет	Замедленная эвакуация желудочного содержимого	Доступ к желудку	Обеспечивает активную и пассивную декомпрессию, позволяет удалять содержимое желудка
От небольшой до средней степени ожирения	Замедленная эвакуация желудочного содержимого Внутрибрюшное давление на легкие	Доступ к желудку. Повышенная герметичность	Обеспечивает активную и пассивную декомпрессию, позволяет удалять содержимое желудка; повышенная герметичность позволяет проводить вентиляцию с положительным давлением
Курильщики и пациенты с астмой	Реактивность дыхательных путей	Неинвазивная, мягкая манжета	Меньшая стимуляция дыхательных путей, меньшее раздражение глотки
Наличие гастро-эзофагеального рефлюкса	Возможность рефлюкса	Повышенная герметичность, канал для желудочного зонда	Повышенная герметичность предотвращает попадание жидкости в голосовую щель; доступ к желудку обеспечивает активную или пассивную декомпрессию и позволяет удалять содержимое желудка; дренажный канал предотвращает попадание жидкости в трахею

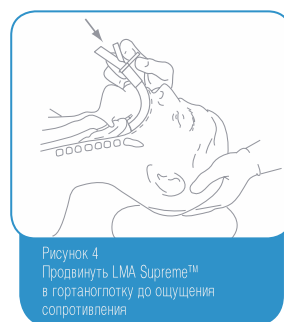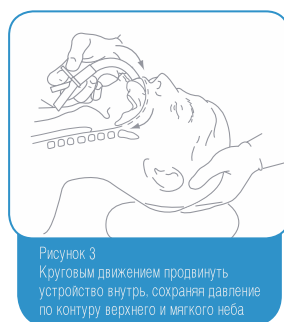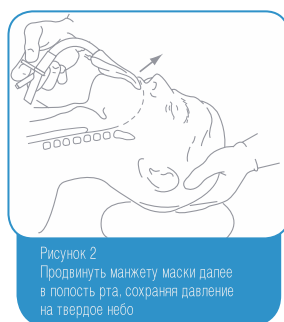

Отзывы в более чем, 90 публикаций, включая:

MA Maktabi, RB Smith, MM Todd. Is Routine Endotracheal Intubation as Safe as We Think or Wish? *Anesthesiology*, 2003, 99 (2), 247–8
 A Tanaka, S Isono, T Ishikawa, J Sato, T Nishino. Laryngeal Resistance before and after Minor Surgery. *Anesthesiology*, 2003, 99 (2), 252–8
 NR Evans, SV Gardner, MFM James, JA King, P Roux, P Bennett, R Nattrass, R Llewellyn, D Visu, The ProSeal™ laryngeal mask: results of a descriptive trial with experience of 300 cases. *BJA*, 2002, 88 (4), 534–9
 Mark DA. Protection from aspiration with the LMA ProSeal after vomiting: a case report. *Can J Anesthesia* 2003 Jan;50 (1):78–80

Краткая характеристика LMA Supreme™		Максимальный объем манжеты (воздух)	Максимальный размер желудочного зонда
Тип маски	Пациент		
1	Новорожденные младенцы до 5 кг	5 ml	6 Fr
1,5	младенцы 5-10 кг	8 ml	6 Fr
2	младенцы 10-20 кг	12 ml	10 Fr
2,5	Дети 20-30 кг	20 ml	10 Fr
3	Дети 30-50 кг	30 ml	14 Fr
4	Взрослые 50-70 кг	45 ml	14 Fr
5	Взрослые 70-100 кг	45 ml	14 Fr

Эксклюзивный дистрибьютор



ООО PEAN, Москва

Тел.: +7 (495) 374-77-56

info@reanmed.ru
www.reanmed.ru

LMA™
The Laryngeal Mask Company Limited

Официальный представитель в Европе:
LMA Deutschland GmbH
Mildred Strasse-Scheel-Strasse 1
53175, Bonn, Germany
www.LMACO.com

Произведено:
The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles

Copyright © 2007, The Laryngeal Mask Company Limited.

Все права защищены. Ни одна часть этой инструкции не может быть воспроизведена, сохранена в поисковых системах или передана в электронном, фотографическом, записанном или любом другом виде без разрешения производителя.

LMA, LMA Classic, LMA Ctrach, LMA Fastrach, LMA Flexible, LMA ProSeal, LMA Rescue, LMA Supreme, LMA Unique, логотип The Laryngeal Mask Company и его части являются торговыми марками The Laryngeal Mask Company Limited.

Информация, приведенная в этом документе верна на момент сдачи инструкции в печать. Производитель вправе улучшать или модифицировать устройство без предварительных уведомлений.

Показания, противопоказания, предупреждения и предостережения, а также информацию о применении LMA™ в различных клинических ситуациях Вы можете найти в инструкции по эксплуатации.

Особенности LMA Supreme защищены серией патентов, каждый из которых покрывает уникальное изобретение.